



**ALMOFADAS ANTI ESCARAS – MANUAL DE UTILIZAÇÃO**  
**COJINES ANTIESCARAS – MANUAL DE USUARIO**  
**ANTIDECUBITUS CUSHION – USER MANUAL**

**COUSSINS ANTI-ESCARRES – MANUEL UTILIZATEUR**  
**CUSCINI ANTI-ULCERA – MANUALE UTENTE**  
**ANTI-DEKUBITUS KISSEN – BENUTZERHANDBUCH**

## Cojines Antiescara:

Los cojines antiescaras previenen la aparición de úlceras por presión, que surgen debido a la permanencia del cuerpo en la misma posición durante largos períodos de tiempo. Las úlceras por presión surgen en zonas de prominencia ósea y puntos de apoyo del cuerpo, como talones, glúteos, hombros, rodillas, codos y pelvis. La presión excesiva sobre un punto del cuerpo limita a circulación de sangre a esa misma área y, en consecuencia, el oxígeno, causando enrojecimiento, destrucción de la dermis / epidermis y, heridas superficiales o profundas. Para evitar la aparición de úlceras de presión, los cuidadores deben usar diferentes soluciones: Cambiar regularmente o posicionamiento del cuerpo; Use cojines o dispositivos que la presión en cada punto de apoyo; Use cremas hidratantes para a piel.

## Selección de modelos e indicaciones de uso:

Según el riesgo de ulceración (Braden o Norton) y peso del usuario.


Os cojines de asiento EvoluXion son adecuados tanto para sillas de ruedas como para asientos convencionales, como sofás, sillas, asientos, etc.

## Clasificación:

Los cojines Antiescaras de asiento EvoluXion se consideran productos sanitarios de clase I, de conformidad con la Directiva 2017/745/EU.



Nantong Yeming Textile Technology Co., Ltd  
Building 1, Group 20, Tangfang village, Zhangzhishan Town  
Tongzhou District, Nantong City, Jiangsu.

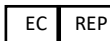

Kingsmead Service B.V.  
Zonnehof 36, 2632 BE, Nootdorp, Netherland  
office@kingsmead-service.com

Modelo	Dimensiones	REF.	Peso máx. utili.	Indicaciones y composición	Grado de riesgo*
EvoGel	42X42X8 cm	EV700	110 kg	Prevención de las escaras. Poliuretano/Viscoelástico y silicona. La zona del coxis tiene doble densidad Evitar las fuerzas de tracción en la superficie del cojín	ALTO
EvoTech	42X42X8 cm	EV900	90kg	Prevención de las escaras. Viscoelástico de alta densidad	MEDIA / ALTA
EvoVisco	42X42X8 cm	EV800	110kg	Prevención de las escaras. Viscoelástico de alta densidad	MEDIA / ALTA

\* Tabela Braden ou Norton



## Limpieza y Mantenimiento:

### Funda:

Todos los cojines traen una funda extraíble, que le permite lavar. Se puede lavar a mano con agua fría, utilizando productos no abrasivos o se puede lavar en la máquina, utilizando un programa para ropa delicada, fría y sin centrifugadoras. Se recomienda utilizar una red de seguridad para evitar la deformación de la cubierta durante el lavado.

Seco en la posición horizontal;

No use lejía;

No planchar.

**Núcleo del cojín:** Bloque de espuma viscoelástica - No mojar.

**Seguridad:**

Asegúrese de que el cojín se ajuste correctamente al asiento.

**Almacenamiento:**

Guarde el cojín preferiblemente horizontalmente, evitando la exposición al sol y la humedad.

**Precauciones:**

- Evitar el contacto del cojín con disolventes, productos corrosivos, decapantes y objetos punzantes.
- Comprobar periódicamente el desgaste normal del cojín, como modificaciones de aspecto, posibles trampas y/o agujeros.
- Evitar el contacto prolongado con líquidos.
- Evitar la exposición al sol;

Evitar la humedad;

- Realizar regularmente un control visual del estado del cojín, ya que el envejecimiento y desgaste del cojín compromete sus propiedades, y en consecuencia su función de antiescaras.

**Garantía:**

Plazo de 2 años desde la fecha de compra. La garantía no cubre el desgaste normal del producto, así como el uso inadecuado del producto.

Para la queja, póngase en contacto con el punto de venta donde se compró el cojín, siendo obligatorio, la presentación del comprobante de compra con fecha y la información del Lote del Artículo.

## Símbolos e Legenda:

	Precaución. Lea primero las instrucciones.
	Fabricante
<b>LOTE</b>	Lote
<b>REF</b>	Referencia dentro de la gama EvoluXion
	Lea primero las instrucciones.
<b>CE</b>	Certificado conforme a la Directiva 2017/745/EU



**Distribuidor Europeu / Distribuidor europeo / European Distributor /  
Distributeur européen / Distributore europeo / Europäischer Vertriebspartner**

Evolution Health, Lda  
Rua Hermano Neves, 18 – 3º Piso – E7  
1600-477 Lisboa  
Portugal  
[info@evoluxionhealth.com](mailto:info@evoluxionhealth.com)