

BASTÓN PLEGABLE BM115

Finalidad:

Una ayuda para caminar para ayudar a quienes tienen una capacidad limitada para caminar.

Características:

Aluminio, PVC

Empuñadura: TPR

Peso máximo: Usuarios de hasta 150 kg.

1 Puntas antideslizante

Tamaño: de 80 a 93 cm

Lote: Ver embalaje

Color: Negro

Fecha de fabricación: Ver embalaje

Modelo: BM115

Marca: BMotion

Mantenimiento y almacenamiento:

Método de limpieza: utilice un paño húmedo para limpiar.

Limpie las empuñaduras con un jabón suave, detergente o limpiador doméstico, no utilice un disolvente orgánico (como acetona, MEK, diluyente de laca, líquido para encendedores, líquido de limpieza en seco, gasolina o aguarrás) que pueda disolver el plástico y hacer que la empuñadura se desgaste. Las punteras de este producto contienen caucho natural.

1. Inspeccione periódicamente el bastón en busca de daños o componentes sueltos.

2. Compruebe que las punteras estén en buen estado. Para preservar la vida de las punteras, sustituya las punteras inmediatamente cuando estén desgastadas.

seco.

Instrucciones de uso:

1. Cuando utilice el bastón para mantener la estabilidad, puede agarrarlo con cualquiera de las dos manos.
2. Sujeta el bastón con la mano contraria a la pierna afectada y muévelo al unísono con ésta. Cada vez que des un paso con la pierna afectada, mueve también el bastón para que te sirva de apoyo al caminar. Cuando des un paso adelante con la pierna no afectada, mantén el bastón en su sitio para que te sirva de apoyo.
3. Es posible que su profesional sanitario le recomiende un patrón de marcha específico.
4. Se ajusta con un botón.
 - 4.1. Afloje el collarín de bloqueo.
 - 4.2. Con los zapatos puestos y el brazo a los lados, la muñeca debe estar a la altura del mango del bastón. Enganche el botón de resorte en el collarín de bloqueo.
 - 4.3. Vuelva a apretar el collarín de bloqueo.
5. Bastones cuádruples
 - 5.1. Ajuste para diestros y zurdos
 - 5.2. Afloje el anillo de bloqueo
 - 5.3. Presione el muelle inferior
 - 5.4. Gire la empuñadura $\frac{1}{2}$ vuelta encajando el botón del muelle en un orificio que proporcione la altura correcta.
 - 5.5. Vuelva a apretar el collarín de bloqueo.

Imágenes del producto:

Evoluxion Health, Lda

 Rua Hermano Neves 18- 3º Piso – E7
1600-477 Lisboa, Portugal

 +351 925 568 105  export@evoluxionhealth.com

Green Visco Spain, S.L.

 Avda Jose Maria Alcaraz y Alenda, Num.2, Esc. 1, Planta 1, Puerta 1
06011 – Badajoz, España

 +34 634 058 47  comercial@greenvisco.com