

## ANDADOR ALUMÍNIO COM RUEDAS Y ASIENTO AN115

**Finalidad:**

Una ayuda para caminar para ayudar a quienes tienen una capacidad limitada para caminar.

**Características:**

Estructura: Aluminio

Empuñaduras: TPR

Peso máximo: Usuarios de hasta 136 kg.

2 Puntas antideslizantes

2 ruedas delanteras

Asiento acolchado

**Tamaño:** 53 x 58,5 x 88 – 97 cm

**Lote:** Ver embalaje

**Color:** Gris / azul

**Fecha de fabricación:** Ver embalaje

**Modelo:** AN115

**Marca:** BMotion

**Maintenance and storage:**

El andador debe ser inspeccionado periódicamente para detectar signos de daño o úsese y tírese. Por favor verifique:

- Daños a la tubería, incluidas dobleces o grietas en las uniones de la tubería.
- Botones desgastados o flojos u orificios alargados
- Empuñaduras flojas o desgastadas

**Instrucciones de uso:**

- 1.Consultar a un profesional sanitario antes de utilizar cualquier dispositivo de movilidad asistida.
- 2.No está diseñado para usarse sobre hielo u otras superficies resbaladizas, ya que tiene el potencial de resbalar.
- 3.Asegúrese de que los botones estén firmemente bloqueados en su posición.
- 4.Tenga precaución al caminar sobre terrenos inclinados/resbaladizos y sobre superficies irregulares.
- 5.Tenga cuidado al caminar hacia atrás sobre obstáculos.
- 6.Nunca sentarse y empujar con los pies.
- 7.No subir ni bajar escaleras con el andador.
- 8.No utilizar el andador en escaleras mecánicas.
- 9.No se suba bajo ningún concepto sobre el andador.
10. Ten cuidado al usar faldas largas, la ropa podría quedar atrapada en la rueda.


**Imágenes del producto:**

Evoluxion Health, Lda

 Rua Hermano Neves 18- 3º Piso – E7  
1600-477 Lisboa, Portugal

 +351 925 568 105  [export@evoluxionhealth.com](mailto:export@evoluxionhealth.com)

Green Visco Spain, S.L.

 Avda Jose Maria Alcaraz y Alenda, Num.2, Esc. 1, Planta 1, Puerta 1  
06011 – Badajoz, España

 +34 634 058 47  [comercial@greenvisco.com](mailto:comercial@greenvisco.com)