



ANDADOR ALUMÍNIO COM FRENO DE PRESIÓN AN150

Finalidad:

Una ayuda para caminar para ayudar a quienes tienen una capacidad limitada para caminar.

Características:

Estructura: Aluminio + PVC

4 ruedas dobles, freno de presión trasero. Empuñadura ergonómica, respaldo, asiento y espacio para almacenamiento. Altura regulable.

Peso máximo: Usuarios de hasta 136 kg.

Asiento acolchado

Tamaño: 64 x 50 x 77 – 91 cm

Lote: Ver embalaje

Color: Negro / azul

Fecha de fabricación: Ver embalaje

Modelo: AN150

Marca: BMotion

Maintenance and storage:

El andador debe ser inspeccionado periódicamente para detectar signos de daño o úsese y tírese. Por favor verifique:

- Daños a la tubería, incluidas dobleces o grietas en las uniones de la tubería.
- Botones desgastados o flojos u orificios alargados
- Empuñaduras flojas o desgastadas

Utilice un paño suave y seco para limpiar el rollator. Mantenga el rollator limpio y ordenado.

Debe almacenarse en un lugar limpio, ventilado y seco. Protéjalo de la lluvia y la humedad, y manipúlelo con cuidado durante el transporte.

Instrucciones de uso:

El manillar debe instalarse antes de utilizar el rollator: desenrosque el pomo del manillar fijo, inserte el manillar en el tubo interior del soporte por la izquierda y por la derecha y ajústelo a la altura adecuada para el usuario, después utilice el pomo de cinco estrellas para bloquearlo. Es necesario abrir completamente el armazón hasta que todas las ruedas estén estables y se puedan utilizar.

Frene temporalmente cuando esté en uso: Levante con fuerza la palanca de freno para frenar.

Estacionamiento prolongado: Sujete la palanca de freno con la mano y presiónela con fuerza. Cuando oiga un «clic», el freno de estacionamiento se abre.

Imágenes del producto: