

## COJÍN ANATÓMICO DE VISCOELÁSTICA Y GEL EV700 BLUE – EV705

### Finalidad:

La capa de gel ayuda a repartir las presiones de forma más uniforme. Aporta sensación de frescor.

Riesgo - Alto

### Características:

Viscoelástica inyectada 80Kg/m<sup>3</sup> + 3D Gel

Funda: Tejido PU, base antideslizante, impermeable, Cremallera.

Parte delantera con asa para facilitar el transporte.

Correa de sujeción con hebilla.

Base antideslizante de primera calidad .

Peso máximo del usuario: 120kg

### Tamaño:

EV700 Blue - 42 x 42 x 8 cm

EV705 - 45 x 42 x 8 cm

**Lote:** Ver embalaje

**Color:** Azul

**Fecha de fabricación:** Ver embalaje

**Modelo:** GeliTech

**Ref:** EV700 Blue, EV705

**Marca:** Evoluxion

### Mantenimiento y almacenamiento:

Núcleo (interior - Visco+Gel) - No lavable.

Funda extraíble. Para mantener la higiene y prolongar la vida útil de la funda de poliuretano de tu cojín, sigue estas recomendaciones:

1. Lavado a mano o en lavadora:

- A mano: Usa un paño húmedo con agua tibia y jabón neutro. Frota suavemente y enjuaga con un paño limpio.
- En lavadora: Usa un ciclo suave con agua fría o tibia (máximo 30°C). Utiliza un detergente suave, sin blanqueadores ni suavizantes. No mezcles con ropa de texturas ásperas que puedan dañar la funda.

2. Secado: Seca al aire libre, evitando la exposición directa al sol.

3. Otras recomendaciones: No planchar, ya que el calor puede dañar el poliuretano. No usar lejía ni productos abrasivos, ya que pueden desgastar la funda. Si hay manchas difíciles, usa una esponja suave con una solución de agua y vinagre blanco en proporción 1:1.

### Instrucciones de uso:

Coloca el cojín sobre una superficie firme y estable (silla, sillón, silla de ruedas o asiento de oficina).

Asegúrate de que el lado con gel quede hacia arriba, ya que esta capa proporciona frescura y alivio de presión.

Ajusta bien la posición antes de sentarte para **evitar deslizamientos**.

### Imágenes del producto:



**Evoluxion Health, Lda**

Rua Hermano Neves 18- 3º Piso – E7  
1600-477 Lisboa, Portugal

+351 925 568 105 [export@evoluxionhealth.com](mailto:export@evoluxionhealth.com)

**Green Visco Spain, S.L.**

Avda Jose Maria Alcaraz y Alenda, Num.2, Esc. 1, Planta 1, Puerta 1  
06011 – Badajoz, España

+34 634 058 47 [comercial@greenvisco.com](mailto:comercial@greenvisco.com)