

## SILLA PARA DUCHA CON INODORO Y DE TRANSPORTE EVO BW655

### Finalidad:

Dispositivo de apoyo para lavarse y ducharse. Es una ayuda técnica que permite a las personas con movilidad reducida o discapacidad, que no pueden hacer un uso convencional de la ducha, mantenerse sentado durante el baño. Además, es una opción para mejorar la calidad de vida de las personas que sufren de incontinencia urinaria.

Elevador de inodoro, silla de ducha, silla de ruedas para interiores.

### Características:

Estructura de nylon reforzado con fibra de vidrio.

4 Ruedas de PVC, reposabrazos elevables, reposapiés desmontables.

Peso máximo: Usuarios de hasta 150 kg.

Asiento acolchado.

**Tamaño:** 53 x 87 x 89 cm

**Lote:** Ver embalaje

**Color:** Gris / Azul

**Fecha de fabricación:** Ver embalaje

**Modelo:** BW655

**Marca:** BWave

### Maintenance and storage:

1.No utilice escaleras mecánicas para mover una silla de ruedas mientras el usuario esté sentado. Puede producir lesiones corporales graves.

2.No se debe intentar alcanzar objetos en ninguno de los siguientes casos:

a.Si implica que el usuario tenga que avanzar en el asiento

b.Si el usuario tiene que recogerlos del suelo

3.Una vez ajustado el reposapiés, es importante comprobar que la altura e inclinación fijada no cause fricción entre la parte trasera de las piernas y la tapicería de la silla.

4.Los reposapiés deben quedar separados del suelo por lo menos 65 mm para evitar posibles caídas.

5.Se debe bloquear los frenos cuando el usuario se sienta o levanta de la silla.

El producto debe almacenarse a temperatura y humedad normales y mantenerse seco.

### Instrucciones de uso:

1. Antes de usar la silla, es conveniente aprender las técnicas para levantarse, sentarse, subir y bajar escalones, rampas, etc.

2. No se debe subir y bajar escaleras sin ayuda.

3. No es recomendable inclinarse hacia delante (para atarse los zapatos, coger algo del suelo, etc.), el usuario podría sufrir una caída

4. No se debe conducir nunca la silla de ruedas sobre las ruedas traseras.

5. Nunca se debe transportar la silla cogida por el reposabrazos, ya que se puede dañar la estructura de la silla. Comprobar que los reposabrazos están debidamente colocados.

6. No realice modificaciones (alteraciones mecánicas) en la silla para no comprometer su seguridad de uso.

7. Siempre se debe respetar el peso máximo de la silla de 150 Kg.

### Imágenes del producto:



Evoluxion Health, Lda

Rua Hermano Neves 18- 3º Piso – E7  
1600-477 Lisboa, Portugal

+351 925 568 105

✉ export@evoluxionhealth.com

Green Visco Spain, S.L.

Avda Jose Maria Alcaraz y Alenda, Num.2, Esc. 1, Planta 1, Puerta 1  
06011 – Badajoz, España

+34 634 058 47

✉ comercial@greenvisco.com